

Kateterset 1100

Brugsanvisning

Forklaring af
symbolerne på
emballagen



Følg brugsanvisningen



Følg
brugsanvisningen



Lotnummer



Sterilt, steriliseret
med etylenoxid



Fremstillingsdato



Udløbsdato

OBS! Katetrene må kun anvendes af en læge eller under tilsyn af en læge, som er bekendt med Seldinger-teknikken eller "Venae sectio" og farerne ved centrale venekatetre.

1. Anvendelse

Katrene anvendes til central venøs tilførsel af lægemidler og infusionsopløsninger i kombination med den implanterbare infusionspumpe LENUS pro®. Katetrene er beregnet til engangsbrug.

2. Håndtering af Seldinger-teknikken

Efter steril punktur af karret med en stålkanyle, som passer til guidewiren, tages guidewiren ud af dispenseren og føres gennem kanylen og ind i karret med den fleksible ende eller J-enden forrest.

Guidewiren fikseres perkutant, og kanylen fjernes helt over guidewiren.

ADVARSEL Når guidewiren føres frem gennem kanylen i karret, skal guidewiren altid holdes fast. Skub altid guidewiren ind med den fleksible ende eller J-enden først.

ADVARSEL Flyt aldrig kanylen distalt med den liggende guidewire.

Indfør forsigtigt dilatatoren med det peelbare hylster i karret over guidewiren gennem en eventuel incision i huden. Fiksér guidewiren, så den ikke glider ved en fejl!

ADVARSEL Flyt aldrig guidewiren distalt sammen med dilatatoren i karret (risiko for perforation)

Fjern guidewiren, fjern dilatatoren, og indfør det skyllede, luftfrie lige kateter 1000 P gennem det peelbare hylster i karret. Til skylning sættes sprøjteadapteren med Luer-Lock-gevind på kateteret. Før katetret til det ønskede sted i venen, samtidig med at det gennemlyses med en C-bue, og kontrollér, at katetret er korrekt placeret.

Markér tilslutningspunktet, og fjern forsigtigt det peelbare hylster uden at trække i eller trykke på katetret. Skær derefter katetret 1000 P af i en ret vinkel.

Skyl nu katetret med hepariniseret kogesaltopløsning for at forhindre, at der sætter sig blod i katetret. Luk nu sprøjteadapteren med en steril kombinationsprop, og forbered en subkutan hudlomme til konnektoren 2000, som fastgøres med fikseringshylsteret 3000.

Klargør den subkutane pumpelomme i den øvre højre eller venstre del af abdomen. Anbring pumpen og den efterfølgende tunnelføring ved tilslutningsstedet. Slut nu de to kateterender til konnektoren 2000, og fiksér begge kateterenderne på konnektoren 2000 med en ikke-resorberbar tyk tråd.

Fiksér nu konnektoren til fascien ved hjælp af det medfølgende fikseringshylster 3000 med ikke-resorberbare tråd.

3. Håndtering af "Venae sectio"

Efter at have udført en hudincision over den ønskede hulvene frilægges karret. Karret visualiseres, og der anlægges en ligatur. Der udføres en incision i venen med skalpel eller saks, og venen åbnes med en veneløfter. Indfør katetret i karret langs veneløfteren. Før katetret frem til den ønskede placering i hulvenen, og afkort katetret til den ønskede længde i en ret vinkel. Skyl katetrets lumen igennem, og fyld det uden bobler. Fortsæt i henhold til ovenstående beskrivelse.

4. De vigtigste kontraindikationer for kateterisering er:

De vigtigste kontraindikationer for kateterisering er:

ADVARSEL

- Koagulationsforstyrrelser eller heparinbehandling ved tidspunktet for punkturen.
- Tidligere operation i halsområdet, f.eks. af skjoldbruskkirtlen, endarterektomi af halspulsåren.
- Skader eller tumorer i nærheden af punkturstedet.
- Vanskeligheder med korrekt lejring til punkturen.

5. Særlige bemærkninger

Delene eller sættet må ikke anvendes, hvis du opdager skader på delene i pakken eller selve emballagen, eller hvis garantiperioden for sterilitet er udløbet.

6. Opbevaring

Katetrene opbevares på et tørt, støvfrit sted, hvor de er beskyttet mod direkte sollys.

7. Reklamation

Ved reklamation bedes de fejlbehæftede dele returneret med angivelse af det lotnummer, som står på etiketten.

8. Ansvar

Der hæftes ikke for person- eller tingsskader, som skyldes forkert eller uhensigtsmæssig håndtering eller opbevaring. Ligeledes udelukkes al hæftelse, hvis katetret er anvendt trods skader på emballagen, eller efter at den angivne garantiperiode for sterilitet er udløbet.



Fremstiller
VitalAire GmbH
Bornbarch 2
22848 Norderstedt

Tlf.: 0800/2 51 11 11
Fax: 0800/2 02 02 02
E-mail: info@vitalaire.de
Hjemmeside: vitalaire.de



Forhandler/distributør
OMT GmbH & Co. KG
optimal medical therapies
Emscherstr. 8
32427 Minden

Tlf.: 0571/974 34-0
Fax: 0571/974 34-39
E-mail: info@omtmed.com



omtmed.com